

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ СТОЛИК ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

1. Общие сведения об изделии.

1.1. **Наименование:** Столик для инвалидной коляски.


1.2. **Артикул:** ADF084R

1.3. **Назначение.** Съемный столик для инвалидного кресла-коляски выполняет функцию опорной поверхности при ежедневном приеме пищи, чтении, рисовании, работе с ноутбуком и других занятиях. Также столик может выступать в роли подноса: с его помощью можно перевозить предметы небольших габаритных размеров, например посуду, книги и т.д.

2. **Технические характеристики изделия.**

2.1. Основные параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры столешницы, мм	длина – 595; ширина – 595; толщина – 9
Ширина рабочей части столешницы, мм	285
Размеры ремня на столешнице, мм	ширина – 40; длина концов – 221 и 700
Размеры съемных ремней для фиксации, мм	ширина – 50; длина – 370
Количество съемных ремней для фиксации, шт.	2
Материалы	Фанера ламинированная, Цвет: Дуб темный

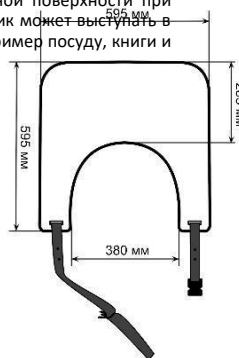

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- столешница в сборе с ремнем и застежкой-фастекс – 1 шт.,

- съемные ремни – 2 шт.,

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2. Изделие упаковывается в индивидуальный пакет из пузырьковой пленки с запаиванием.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности.

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Запрещается использовать изделие не по назначению (например, сидеть на столике или перемещать громоздкие предметы).

3.3. Допустимая нагрузка на изделие – до 10 кг.

4. Условия транспортировки.

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

5.2. Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

QR-код, ссылка на страницу
товара на сайте производителя



Изделие принято годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ СТОЛИК ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

1. Общие сведения об изделии.

1.1. **Наименование:** Столик для инвалидной коляски.


1.2. **Артикул:** ADF084R

1.3. **Назначение.** Съемный столик для инвалидного кресла-коляски выполняет функцию опорной поверхности при ежедневном приеме пищи, чтении, рисовании, работе с ноутбуком и других занятиях. Также столик может выступать в роли подноса: с его помощью можно перевозить предметы небольших габаритных размеров, например посуду, книги и т.д.

2. **Технические характеристики изделия.**

2.1. Основные параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры столешницы, мм	длина – 595; ширина – 595; толщина – 9
Ширина рабочей части столешницы, мм	285
Размеры ремня на столешнице, мм	ширина – 40; длина концов – 221 и 700
Размеры съемных ремней для фиксации, мм	ширина – 50; длина – 370
Количество съемных ремней для фиксации, шт.	2
Материалы	Фанера ламинированная, Цвет: Дуб темный

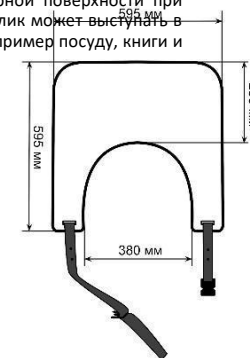

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- столешница в сборе с ремнем и застежкой-фастекс – 1 шт.,

- съемные ремни – 2 шт.,

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2. Изделие упаковывается в индивидуальный пакет из пузырьковой пленки с запаиванием.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности.

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Запрещается использовать изделие не по назначению (например, сидеть на столике или перемещать громоздкие предметы).

3.3. Допустимая нагрузка на изделие – до 10 кг.

4. Условия транспортировки.

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

5.2. Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

QR-код, ссылка на страницу
товара на сайте производителя



Изделие принято годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛИК ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

Конструкция. Изделие представляет собой плоскую плиту из ламинированной фанеры с округлой выемкой, образующей пространство для сидящего в кресле человека. Выемка условно разделяет изделие на столешницу и два подлокотника. В прорезях подлокотников столешницы закреплён ремень из усиленной стропы с застежкой на пряжку-фастекс для надежной фиксации столика за спинкой коляски. К столику дополнительно прилагаются съемные фиксирующие ремни, застегивающиеся на липучку.

Инструкция по использованию.

1. Установка столика на коляску. Расстегните пряжку на ремне, прикрепленном к подлокотникам столешницы. Установите столик на подлокотники кресла так, чтобы ремень находился у спинки коляски.
2. Фиксация на коляске. Пропустив за спинкой коляски оба конца ремня, прикрепленного к прорезям подлокотников столешницы, застегните пряжку-фастекс и затяните ремень, потянув за его свободный конец (вставленный в рамку пряжки-фастекса). Длина ремня регулируется концом стропы, вставленным в рамку пряжки. При необходимости возьмите съемные фиксирующие ремни, проденьте их под ручками кресла (на каждую ручку кресла по одному ремню), туго оберните ремнями ручки кресла вместе с подлокотниками столешницы и застегните липучки.

Хранение и уход.

- Изделие должно храниться при температуре не ниже +2 °С.
- После транспортировки изделия при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать столик при комнатной температуре не менее суток без механических воздействий.
- Столик рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не хранить вблизи отопительных приборов, не нагревать, беречь от огня.
- Не мочить. При попадании жидкости на поверхность – протереть сухой салфеткой. Следует особенно оберегать торцы изделия от попадания жидкостей.
- При загрязнении протереть влажной тряпкой. Не использовать абразивные моющие средства, щетки и металлические мочалки.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировании и хранении изделие должно быть надежно защищено от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

Если у Вас возникли вопросы по столику для инвалидной коляски, свяжитесь с нами.

Наш сайт: tmkos.ru

Здоровья Вам и Вашим близким!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛИК ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

Конструкция. Изделие представляет собой плоскую плиту из ламинированной фанеры с округлой выемкой, образующей пространство для сидящего в кресле человека. Выемка условно разделяет изделие на столешницу и два подлокотника. В прорезях подлокотников столешницы закреплён ремень из усиленной стропы с застежкой на пряжку-фастекс для надежной фиксации столика за спинкой коляски. К столику дополнительно прилагаются съемные фиксирующие ремни, застегивающиеся на липучку.

Инструкция по использованию.

1. Установка столика на коляску. Расстегните пряжку на ремне, прикрепленном к подлокотникам столешницы. Установите столик на подлокотники кресла так, чтобы ремень находился у спинки коляски.
2. Фиксация на коляске. Пропустив за спинкой коляски оба конца ремня, прикрепленного к прорезям подлокотников столешницы, застегните пряжку-фастекс и затяните ремень, потянув за его свободный конец (вставленный в рамку пряжки-фастекса). Длина ремня регулируется концом стропы, вставленным в рамку пряжки. При необходимости возьмите съемные фиксирующие ремни, проденьте их под ручками кресла (на каждую ручку кресла по одному ремню), туго оберните ремнями ручки кресла вместе с подлокотниками столешницы и застегните липучки.

Хранение и уход.

- Изделие должно храниться при температуре не ниже +2 °С.
- После транспортировки изделия при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать столик при комнатной температуре не менее суток без механических воздействий.
- Столик рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не хранить вблизи отопительных приборов, не нагревать, беречь от огня.
- Не мочить. При попадании жидкости на поверхность – протереть сухой салфеткой. Следует особенно оберегать торцы изделия от попадания жидкостей.
- При загрязнении протереть влажной тряпкой. Не использовать абразивные моющие средства, щетки и металлические мочалки.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировании и хранении изделие должно быть надежно защищено от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

Если у Вас возникли вопросы по столику для инвалидной коляски, свяжитесь с нами.

Наш сайт: tmkos.ru

Здоровья Вам и Вашим близким!