


ПАСПОРТ
АДАПТИВНОЕ БОДИ С МОЛНИЕЙ В ШАГОВОМ ШВЕ, КОС®

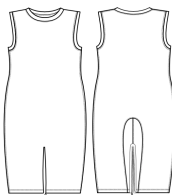

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Адаптивное боди – одежда, созданная преимущественно для лежачих людей со значительной потерей двигательной активности, нуждающихся в частой смене средств гигиены. Предупреждает попытки снять и разорвать подгузник и одежду. Психозомоциональная и физическая защита подопечного. Для повседневной носки.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	S	M	L	XL	2XL	3XL
Соответствие российскому размеру	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
Рост, см. _____	160-170					
	ADW003R_ LBS	ADW003R_ LBM	ADW003R_ LBL	ADW003R_ LBXL	ADW003R_ LB2XL	ADW003R_ LB3XL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	170-180					
Артикул	ADW005R_ LBS	ADW005R_ LBM	ADW005R_ LBL	ADW005R_ LBXL	ADW005R_ LB2XL	ADW005R_ LB3XL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Цвет	Голубой					
Материалы	100% хлопок					

2 Комплект поставки

- адаптивное боди с молнией в шаговом шве – 1 шт.
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

- 1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).
- 2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- 2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.
- 6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
 - механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
 - ненадлежащего их использования;
 - неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
 - доработки изделий потребителем (изменений конструкции).


Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

ПАСПОРТ
АДАПТИВНОЕ БОДИ С МОЛНИЕЙ В ШАГОВОМ ШВЕ, КОС®

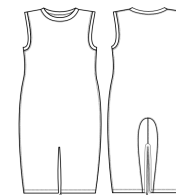

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Адаптивное боди – одежда, созданная преимущественно для лежачих людей со значительной потерей двигательной активности, нуждающихся в частой смене средств гигиены. Предупреждает попытки снять и разорвать подгузник и одежду. Психозомоциональная и физическая защита подопечного. Для повседневной носки.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	S	M	L	XL	2XL	3XL
Соответствие российскому размеру	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
Рост, см. _____	160-170					
	ADW003R_ LBS	ADW003R_ LBM	ADW003R_ LBL	ADW003R_ LBXL	ADW003R_ LB2XL	ADW003R_ LB3XL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	170-180					
Артикул	ADW005R_ LBS	ADW005R_ LBM	ADW005R_ LBL	ADW005R_ LBXL	ADW005R_ LB2XL	ADW005R_ LB3XL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Цвет	Голубой					
Материалы	100% хлопок					

2 Комплект поставки

- адаптивное боди с молнией в шаговом шве – 1 шт.
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

- 4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).
- 4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- 4.2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.
- 6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
 - механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
 - ненадлежащего их использования;
 - неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
 - доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

АДАПТИВНОЕ БОДИ С МОЛНИЕЙ В ШАГОВОМ ШВЕ, КОС®

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция


Гигиеническое боди без рукавов с обтачками по горловине и проймам, длина штанины - до колена. Передняя и задняя части изделия цельнокроенные. В шаговом шве предусмотрена разъемная молния. Швы изделия выведены наружу.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Размер	Рост		Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
S (42-44)	160-170	170-180	84-88	62-76	88-100
M (46-48)	160-170	170-180	92-96	65-82	92-104
L (50-52)	160-170	170-180	100-104	74-88	96 -108
XL (54-56)	160-170	170-180	108-112	83-94	104-116
2XL (58-60)	160-170	170-180	116-120	94-119	114-126
3XL (62-64)	160-170	170-180	124-128	106-115	124-136

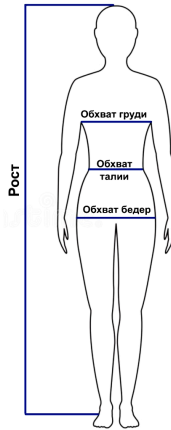

2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3 Инструкция по использованию

Рекомендуется следующий порядок надевания изделия на лежащего подопечного:

1. Расстегните молнию в шаговом шве боди.
2. Сложите боди в руках для удобства надевания так, чтобы получился удобный "вход" в горловину и проймы.
3. Аккуратно наденьте боди поочередно на руки подопечного, а затем на голову.
4. Перемещая подопечного с одного бока на другой наденьте на него боди, расправляя его по направлению к ногам (для удобства можно согнуть ноги подопечного в коленях).
5. Застегните молнию в шаговом шве.

4 Правила ухода за изделием

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть молнии. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



- ⚠ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.
- ⚠ Во избежание поломок застежки-молнии пользование гладильным катком запрещено.

АДАПТИВНОЕ БОДИ С МОЛНИЕЙ В ШАГОВОМ ШВЕ, КОС®

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Гигиеническое боди без рукавов с обтачками по горловине и проймам, длина штанины - до колена. Передняя и задняя части изделия цельнокроенные. В шаговом шве предусмотрена разъемная молния. Швы изделия выведены наружу.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Размер	Рост		Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
S (42-44)	160-170	170-180	84-88	62-76	88-100
M (46-48)	160-170	170-180	92-96	65-82	92-104
L (50-52)	160-170	170-180	100-104	74-88	96 -108
XL (54-56)	160-170	170-180	108-112	83-94	104-116
2XL (58-60)	160-170	170-180	116-120	94-119	114-126
3XL (62-64)	160-170	170-180	124-128	106-115	124-136



2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3 Инструкция по использованию

Рекомендуется следующий порядок надевания изделия на лежащего подопечного:

6. Расстегните молнию в шаговом шве боди.
7. Сложите боди в руках для удобства надевания так, чтобы получился удобный "вход" в горловину и проймы.
8. Аккуратно наденьте боди поочередно на руки подопечного, а затем на голову.
9. Перемещая подопечного с одного бока на другой наденьте на него боди, расправляя его по направлению к ногам (для удобства можно согнуть ноги подопечного в коленях).
10. Застегните молнию в шаговом шве.

4 Правила ухода за изделием

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть молнии. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



- ⚠ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.
- ⚠ Во избежание поломок застежки-молнии пользование гладильным катком запрещено.

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

Здоровья Вам и Вашим близким!

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

Здоровья Вам и Вашим близким!