

ПАСПОРТ

ЧЕХОЛ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ С ЛЯМКАМИ, КОС®

1. Общие сведения об изделии

Назначение. Утепленный, водонепроницаемый чехол для инвалидных колясок предназначен для прогулок в холодную, дождливую и снежную погоду. Чехол для инвалидов-колясочников дополняет верхнюю одежду - позволяет людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года, защищая от ветра, дождя и мокрого снега.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия

Размер	S-M	L-XL	2XL-3XL
Российский размер, общий	44-48	50-52	52-56
Цвет	Тёмно-синий		
Материалы	Внешний слой – 100% полиэстер с ПУ покрытием; внутренний слой – 100% полиэстер; наполнитель - синтепон		

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- чехол утепленный для инвалидов-колясочников с лямками – 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый zip-пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

3.3. Запрещается применение изделия при:

- имеющихся повреждениях кожи в области накладывания изделия;
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России

ПАСПОРТ

ЧЕХОЛ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ С ЛЯМКАМИ, КОС®

1. Общие сведения об изделии

Назначение. Утепленный, водонепроницаемый чехол для инвалидных колясок предназначен для прогулок в холодную, дождливую и снежную погоду. Чехол для инвалидов-колясочников дополняет верхнюю одежду - позволяет людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года, защищая от ветра, дождя и мокрого снега.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия

Размер	S-M	L-XL	2XL-3XL
Российский размер, общий	44-48	50-52	52-56
Цвет	Тёмно-синий		
Материалы	Внешний слой – 100% полиэстер с ПУ покрытием; внутренний слой – 100% полиэстер; наполнитель - синтепон		

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- чехол утепленный для инвалидов-колясочников с лямками – 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый zip-пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

3.3. Запрещается применение изделия при:

- имеющихся повреждениях кожи в области накладывания изделия;
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧЕХОЛ УТЕПЛЕННЫЙ для ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ С ЛЯМКАМИ

Конструкция.

Изделие является аналогом спального мешка. Эргономичность и удобство чехла достигается тем, что его конструкция имеет ступенчатую разработку для комфорта сидящего человека. Изделие конструктивно состоит из передней, задней и боковых частей, утепленных изнутри стеганым синтепоном. Передняя часть полностью раскрывается благодаря застежке на 2 молнии с пуллерами. Задняя часть (спинка) - цельнокроенная с дном чехла. В верхней части спинки расположены паты с лентой велкро, на уровне поясицы располагается ремень из стропы с двумя регулировочными рамками с застежкой на фастекс. В верхней части чехла расположены лямки с регулировочными рамками и застежкой-фастекс.

Инструкция по использованию.

1. Расположите чехол в инвалидном кресле, надев паты с лентой велкро на рукоять коляски, расстегните все застежки-фастексы..
2. Поместите поясичные ремни со стороны спинки инвалидного кресла, застегните застежку-фастекс, отрегулируйте длину ремней по ширине кресла.
3. Расстегните замки-молнии.
4. Усадите человека в кресло и застегните чехол.

Хранение и уход. Регулярно чистить изделие мягкой ворсистой щеткой и теплой водой без использования моющих средств. Можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо одежду тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.



Конструкция.

Изделие является аналогом спального мешка. Эргономичность и удобство чехла достигается тем, что его конструкция имеет ступенчатую разработку для комфорта сидящего человека. Изделие конструктивно состоит из передней, задней и боковых частей, утепленных изнутри стеганым синтепоном. Передняя часть полностью раскрывается благодаря застежке на 2 молнии с пуллерами. Задняя часть (спинка) - цельнокроенная с дном чехла. В верхней части спинки расположены паты с лентой велкро, на уровне поясицы располагается ремень из стропы с двумя регулировочными рамками с застежкой на фастекс. В верхней части чехла расположены лямки с регулировочными рамками и застежкой-фастекс.

Инструкция по использованию.

5. Расположите чехол в инвалидном кресле, надев паты с лентой велкро на рукоять коляски, расстегните все застежки-фастексы..
6. Поместите поясичные ремни со стороны спинки инвалидного кресла, застегните застежку-фастекс, отрегулируйте длину ремней по ширине кресла.
7. Расстегните замки-молнии.
8. Усадите человека в кресло и застегните чехол.

Хранение и уход. Регулярно чистить изделие мягкой ворсистой щеткой и теплой водой без использования моющих средств. Можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо одежду тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.

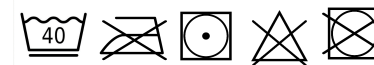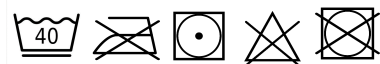

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. Наш сайт tmkos.ru
Здоровья Вам и Вашим близким!

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. Наш сайт tmkos.ru
Здоровья Вам и Вашим близким!