

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Доска для пересаживания прямая, 97 см. КОС®

1. Общие сведения об изделии.

1.1. **Наименование:** Доска для пересаживания прямая, 97 см.

1.2. **Артикул:** TRF025R

1.3. **Назначение.** Изделие используется как вспомогательное приспособление для пересаживания пожилых, ослабленных людей и пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С помощью доски можно перемещаться в положении сидя, например, с кресла-коляски на кровать или в автомобиль. Доска предназначена как для перемещения с помощью ухаживающего, так и для развития двигательной самостоятельности при перемещении.

1.4. **Конструкция.** Изделие представляет собой прямоугольную пластину прочного композитного материала из клееного берёзового шпона (фанеры) с полимерным покрытием, гладким на лицевой стороне и ребристым, противоскользящим - с тыльной стороны. Для удобства использования, транспортировки и хранения в изделии предусмотрена прорези — ручки.

2. Технические характеристики изделия.

2.1. Основные параметры изделия:

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
Длина изделия, мм	970 (+/-15)
Ширина изделия, мм	238 (+/-10)
Толщина изделия, мм	10 (+/-3)
Материал изделия	Фанера
Максимальная нагрузка на изделие, кг	150
Вес НЕТТО, кг	1,85 (+/- 0.37)

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- доска для пересаживания – 1 шт.,

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный пластиковый пакет из пузырчатой плёнки.

3. Условия транспортировки.

3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

4. Гарантийные обязательства.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

4.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Доска для пересаживания прямая, 97 см. КОС®

1. Общие сведения об изделии.

1.1. **Наименование:** Доска для пересаживания прямая, 97 см.

1.2. **Артикул:** TRF025R

1.3. **Назначение.** Изделие используется как вспомогательное приспособление для пересаживания пожилых, ослабленных людей и пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С помощью доски можно перемещаться в положении сидя, например, с кресла-коляски на кровать или в автомобиль. Доска предназначена как для перемещения с помощью ухаживающего, так и для развития двигательной самостоятельности при перемещении.

1.4. **Конструкция.** Изделие представляет собой прямоугольную пластину прочного композитного материала из клееного берёзового шпона (фанеры) с полимерным покрытием, гладким на лицевой стороне и ребристым, противоскользящим - с тыльной стороны. Для удобства использования, транспортировки и хранения в изделии предусмотрена прорези — ручки.

2. Технические характеристики изделия.

2.1. Основные параметры изделия:

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
Длина изделия, мм	970 (+/-15)
Ширина изделия, мм	238 (+/-10)
Толщина изделия, мм	10 (+/-3)
Материал изделия	Фанера
Максимальная нагрузка на изделие, кг	150
Вес НЕТТО, кг	1,85 (+/- 0.37)

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- доска для пересаживания – 1 шт.,

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный пластиковый пакет из пузырчатой плёнки.

3. Условия транспортировки.

3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

4. Гарантийные обязательства.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

4.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Инструкция по использованию

ВНИМАНИЕ! Перед пересаживанием с одной поверхности на другую убедитесь в устойчивости поверхностей и предметов, между которыми будет производиться перемещение. Если это инвалидная коляска, то колеса должны быть заблокированы, а подножка и подлокотник, по возможности, убраны.

Пересаживание (в примере с кровати на инвалидное кресло):

1. Усадите пациента на край кровати и подкатите к нему инвалидное кресло, так чтобы колеса кресла были параллельны длинной стороне кровати (или под углом 45°-60°) и как можно ближе к ней. Зафиксируйте неподвижно инвалидное кресло (с помощью тормозов).
2. Для осуществления перемещения подложите доску под ягодицу пациента (с той стороны, в которую будет производиться перемещение). Гладкая сторона должна быть сверху (для лучшего скольжения по доске), а шершавая/ребристая сторона должна быть снизу для улучшения сцепления и уменьшения вероятности соскальзывания.
3. Встаньте перед пациентом вплотную. Поддерживая под ягодицы, переместите пациента в коляску, используя скольжение по гладкой поверхности доски.



Видеоинструкцию вы можете посмотреть тут: (отсканируйте QR код).

ВНИМАНИЕ! Доска для пересаживания подлежит использованию строго по назначению в соответствии с инструкцией по её применению, под контролем медицинского персонала либо ответственных лиц, осуществляющих уход. Имеются противопоказания. Перед началом самостоятельного применения необходима консультация лечащего врача. Использование доски для пересаживания несовершеннолетними допустимо с согласия и под контролем законных представителей пациента после обязательной консультации с лечащим врачом.

Хранение и уход. Протирать слегка влажной тряпкой. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Держать вдали от отопительных приборов. Запрещено применять хлор и оптические отбеливатели.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.

Инструкция по использованию

ВНИМАНИЕ! Перед пересаживанием с одной поверхности на другую убедитесь в устойчивости поверхностей и предметов, между которыми будет производиться перемещение. Если это инвалидная коляска, то колеса должны быть заблокированы, а подножка и подлокотник, по возможности, убраны.

Пересаживание (в примере с кровати на инвалидное кресло):

4. Усадите пациента на край кровати и подкатите к нему инвалидное кресло, так чтобы колеса кресла были параллельны длинной стороне кровати (или под углом 45°-60°) и как можно ближе к ней. Зафиксируйте неподвижно инвалидное кресло (с помощью тормозов).
5. Для осуществления перемещения подложите доску под ягодицу пациента (с той стороны, в которую будет производиться перемещение). Гладкая сторона должна быть сверху (для лучшего скольжения по доске), а шершавая/ребристая сторона должна быть снизу для улучшения сцепления и уменьшения вероятности соскальзывания.
6. Встаньте перед пациентом вплотную. Поддерживая под ягодицы, переместите пациента в коляску, используя скольжение по гладкой поверхности доски.



Видеоинструкцию вы можете посмотреть тут: (отсканируйте QR код).

ВНИМАНИЕ! Доска для пересаживания подлежит использованию строго по назначению в соответствии с инструкцией по её применению, под контролем медицинского персонала либо ответственных лиц, осуществляющих уход. Имеются противопоказания. Перед началом самостоятельного применения необходима консультация лечащего врача. Использование доски для пересаживания несовершеннолетними допустимо с согласия и под контролем законных представителей пациента после обязательной консультации с лечащим врачом.

Хранение и уход. Протирать слегка влажной тряпкой. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Держать вдали от отопительных приборов. Запрещено применять хлор и оптические отбеливатели.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО "КОС".

Страна производства: Россия.