

ПАСПОРТ

Опора под спину на кровать, с пластиковыми загнутыми подлокотниками, регулируемая, со съёмной тканью спинки КОС®

1. Назначение. Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежащем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и возрастных людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намочения, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды. Ткань спинки опоры съёмная, оснащена липучкой по периметру.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF017R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	720*610*600 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	700*610*230 (±30)
Размеры подголовника-подушки, Д*Ш*В, мм	305*180*20 (±20)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	3100 (±140)



QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

4. Сведения об упаковке и маркировке:

4.1. Комплект поставки

- опора под спину на кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

4.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

5. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

6. Условия транспортировки

6.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

6.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

7.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

7.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Примечание: спинка изделия оснащена липучкой-велкро и натяжение ткани можно изменять самостоятельно.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

ПАСПОРТ

Опора под спину на кровать, с пластиковыми загнутыми подлокотниками, регулируемая, со съёмной тканью спинки КОС®

1. Назначение. Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности (кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежащем. Применяется для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной недостаточностью) и возрастных людей длительно находящихся на постельном режиме - путем изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие выполнено из нетоксичных материалов. Может использоваться как в домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах престарелых, центрах реабилитации и др. Спинка изделия мягкая и упругая, что обеспечивает комфорт даже при невралгиях и травмах грудной клетки. Материал спинки изделия быстро высыхает после намочения, имеет низкий показатель абсорбции (впитывания) воды. Ткань спинки опоры съёмная, оснащена липучкой по периметру.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF017R
Размеры изделия, разложенного на макс. 65° Д*Ш*В, мм	720*610*600 (±30)
Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм	700*610*230 (±30)
Размеры подголовника-подушки, Д*Ш*В, мм	305*180*20 (±20)
Максимально допустимая нагрузка, кг	120
Вес изделия, г	3100 (±140)



QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

4. Сведения об упаковке и маркировке:

4.1. Комплект поставки

- опора под спину на кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

4.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

5. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

6. Условия транспортировки

6.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

6.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

7.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

7.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Примечание: спинка изделия оснащена липучкой-велкро и натяжение ткани можно изменять самостоятельно.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.