

ПАСПОРТ - ИНСТРУКЦИЯ

Ширма-перегородка на колесах, с каркасом из алюминия и тремя секциями из сотового поликарбоната, 156*180 см, КОС®

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. **Наименование:** Ширма-перегородка на колесах, с каркасом из алюминия и тремя секциями из сотового поликарбоната.
1.2. **Артикул:** ADF015R
1.3. **Назначение:** Ширма перегородка предназначена для зонирования и разграничения палат и рабочих помещений на отдельные отсеки, выделения площадей для проведения гигиенических процедур или переодевания и т.д.
2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Размеры изделия, Д*Ш*В, мм	1560*510*1800 (±55)
Материал рамы каркаса	Алюминий (сплав)
Материал внутренней части секции ширмы	Поликарбонат
Количество колес (со стопором), шт	6
Количество секций, шт	3
Вес НЕТТО, г	8000 (±356)

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- Ширма из трех секций (поставляются в частично разобранном виде, для удобства транспортировки) — 1 шт.,
- Поперечная перекладина основания (поставляется в сборе с колесами) — 2 шт.,
- Крепёж (винты М4*12 с головками под крестовую отвертку) — 8 шт.,
- вкладыш-инструкция — 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в пузырчатую пленку/картон/пластиковый пакет.

3. Условия транспортировки

- 3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%

4. Гарантийные обязательства

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.
4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).
4.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.


5. Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Инструкция по сборке изделия

Для сборки вам понадобится крестовая отвертка. Положите ширму на устойчивую поверхность и прикрепите поперечные перекладины с колёсами как показано на рисунке. Для этого понадобятся закрутить 4 винта на каждой перекладине(крестовой отвёрткой) в предназначенные для них отверстия с резьбой.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте ширму дополнительным нагрузкам: не облакачивайтесь на ширму, не вставляйте на перекладину, не вешайте на ширму одежду и прочие предметы и т.д.

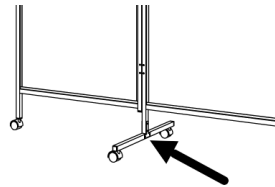

Хранение и уход

Не использовать абразивные или хлорсодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели, кислоты.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

ПАСПОРТ - ИНСТРУКЦИЯ

Ширма-перегородка на колесах, с каркасом из алюминия и тремя секциями из сотового поликарбоната, 156*180 см, КОС®

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. **Наименование:** Ширма-перегородка на колесах, с каркасом из алюминия и тремя секциями из сотового поликарбоната.
1.2. **Артикул:** ADF015R
1.3. **Назначение:** Ширма перегородка предназначена для зонирования и разграничения палат и рабочих помещений на отдельные отсеки, выделения площадей для проведения гигиенических процедур или переодевания и т.д.
2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Размеры изделия, Д*Ш*В, мм	1560*510*1800 (±55)
Материал рамы каркаса	Алюминий (сплав)
Материал внутренней части секции ширмы	Поликарбонат
Количество колес (со стопором), шт	6
Количество секций, шт	3
Вес НЕТТО, г	8000 (±356)

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- Ширма из трех секций (поставляются в частично разобранном виде, для удобства транспортировки) — 1 шт.,
- Поперечная перекладина основания (поставляется в сборе с колесами) — 2 шт.,
- Крепёж (винты М4*12 с головками под крестовую отвертку) — 8 шт.,
- вкладыш-инструкция — 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в пузырчатую пленку/картон/пластиковый пакет.

3. Условия транспортировки

- 3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%

4. Гарантийные обязательства

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.
4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).
4.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.


5. Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Инструкция по сборке изделия

Для сборки вам понадобится крестовая отвертка. Положите ширму на устойчивую поверхность и прикрепите поперечные перекладины с колёсами как показано на рисунке. Для этого понадобятся закрутить 4 винта на каждой перекладине(крестовой отвёрткой) в предназначенные для них отверстия с резьбой.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте ширму дополнительным нагрузкам: не облакачивайтесь на ширму, не вставляйте на перекладину, не вешайте на ширму одежду и прочие предметы и т.д.

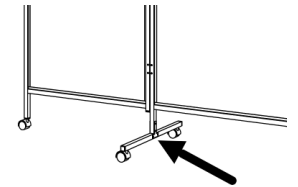

Хранение и уход

Не использовать абразивные или хлорсодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели, кислоты.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.