

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
Захват для удержания посуды, КОС®

1. Общие сведения об изделии.

- 1.1. **Наименование:** Захват для удержания посуды, КОС®
1.2. **Артикул:** SER009R

1.3. **Назначение.** Изделие предназначено для удерживания банок и бутылок без помощи рук (таким образом открутить/закрутить крышку можно одной рукой), что помогает пожилым людям, больным и инвалидам с патологией и травмами нервной системы и опорно-двигательного аппарата быть более самостоятельными в быту.

1.4. **Конструкция.** Изделие представляет собой прямоугольный зажим с выступом снизу, зацепляющимся за край стола. В торце расположен толкатель, передающий нагрузку от бедра человека к выемке, в которую устанавливается банка/бутылка. В результате предмет оказывается прочно зажат без помощи рук.

2. Технические характеристики изделия.

2.1. Основные параметры изделия

Наименование показателя	Значение
Материал изделия	Пластик
Общая длина изделия, мм	352 (+/-15)
Общая ширина изделия, мм	182 (+/-10)
Общая высота изделия, мм	62 (+/-10)
Максимальный диаметр банки, мм	120 (+/-10)



QR-код, ссылка на
страницу товара
на сайте производителя

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- захват для удержания посуды – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2. Изделие упаковывается в индивидуальный пластиковый пакет.

3. Условия транспортировки.

3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

4.2. Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Инструкция по использованию

Положите изделие на край стола так, чтобы специальный выступ снизу упёрся в него. Выдвиньте штوك и установите в образовавшуюся выемку банку/бутылку. С осторожностью надавите на шток бедром – банка/бутылка зафиксирована. Не прекращая давить бедром на шток, открутите или закрутите рукой крышку.

ВНИМАНИЕ!!! Соизмеряйте усилие, чтобы не повредить банку/бутылку, не сдвинуть стол и т. д.

Хранение и уход. Можно мыть с помощью бытовых моющих средств с последующим протиранием сухой ветошью. Не использовать абразивные средства.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

Штамп ОТК _____

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
Захват для удержания посуды, КОС®

1. Общие сведения об изделии.

- 1.1. **Наименование:** Захват для удержания посуды, КОС®
1.2. **Артикул:** SER009R

1.3. **Назначение.** Изделие предназначено для удерживания банок и бутылок без помощи рук (таким образом открутить/закрутить крышку можно одной рукой), что помогает пожилым людям, больным и инвалидам с патологией и травмами нервной системы и опорно-двигательного аппарата быть более самостоятельными в быту.

1.4. **Конструкция.** Изделие представляет собой прямоугольный зажим с выступом снизу, зацепляющимся за край стола. В торце расположен толкатель, передающий нагрузку от бедра человека к выемке, в которую устанавливается банка/бутылка. В результате предмет оказывается прочно зажат без помощи рук.

2. Технические характеристики изделия.

2.1. Основные параметры изделия

Наименование показателя	Значение
Материал изделия	Пластик
Общая длина изделия, мм	352 (+/-15)
Общая ширина изделия, мм	182 (+/-10)
Общая высота изделия, мм	62 (+/-10)
Максимальный диаметр банки, мм	120 (+/-10)



QR-код, ссылка на
страницу товара
на сайте производителя

2.2. Сведения об упаковке и маркировке.

2.2.1. Комплектация:

- захват для удержания посуды – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и хранению – 1 шт.

2.2.2. Изделие упаковывается в индивидуальный пластиковый пакет.

3. Условия транспортировки.

3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

3.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

4.2. Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Инструкция по использованию

Положите изделие на край стола так, чтобы специальный выступ снизу упёрся в него. Выдвиньте шток и установите в образовавшуюся выемку банку/бутылку. С осторожностью надавите на шток бедром – банка/бутылка зафиксирована. Не прекращая давить бедром на шток, открутите или закрутите рукой крышку.

ВНИМАНИЕ!!! Соизмеряйте усилие, чтобы не повредить банку/бутылку, не сдвинуть стол и т. д.

Хранение и уход. Можно мыть с помощью бытовых моющих средств с последующим протиранием сухой ветошью. Не использовать абразивные средства.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

Штамп ОТК _____