

ПАСПОРТ

Адаптивные трусы на кнопках женские, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Предмет женского нижнего белья, облегчающий процесс переодевания и доступ к замене средств гигиены (подгузнику) пациентам с проблемами в области таза и нижних конечностей. Изделие облегчает ежедневный уход при ношении пациентом ортопедических конструкций, восстановлении после травм, при вынужденном положении (нейродегенеративные заболевания, инсульты, нижние параличи и парезы различного генеза), а также в пожилом и старческом возрастах.

1.2 Технические характеристики изделия

| Размер                                 | S                                                                                                | M                                                                                                | L                                                                                                | XL                                                                                                | 2XL                                                                                                | 3XL                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие<br>российскому<br>размеру | 40-42                                                                                            | 44-46                                                                                            | 46-48                                                                                            | 50-52                                                                                             | 54-56                                                                                              | 58-60                                                                                              |
| Артикул<br>Цвет                        | ADW041R_WTS<br> | ADW041R_WTM<br> | ADW041R_WTL<br> | ADW041R_WTXL<br> | ADW041R_WT2XL<br> | ADW041R_LB3XL<br> |
|                                        | белый                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|                                        | ADW041R_LBS<br> | ADW041R_LBM<br> | ADW041R_LBL<br> | ADW041R_LBXL<br> | ADW041R_LB2XL<br> | ADW041R_LB3XL<br> |
| голубой                                |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Материалы                              | 100% хлопок                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

2 Комплект поставки

- адаптивные трусы на кнопках, женские (размер и цвет изделия отмечены в п. 1.2) – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Произведено в России.

ПАСПОРТ

Адаптивные трусы на кнопках женские, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Предмет женского нижнего белья, облегчающий процесс переодевания и доступ к замене средств гигиены (подгузнику) пациентам с проблемами в области таза и нижних конечностей. Изделие облегчает ежедневный уход при ношении пациентом ортопедических конструкций, восстановлении после травм, при вынужденном положении (нейродегенеративные заболевания, инсульты, нижние параличи и парезы различного генеза), а также в пожилом и старческом возрастах.

1.2 Технические характеристики изделия

| Размер                                 | S                                                                                                  | M                                                                                                  | L                                                                                                  | XL                                                                                                  | 2XL                                                                                                  | 3XL                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие<br>российскому<br>размеру | 40-42                                                                                              | 44-46                                                                                              | 46-48                                                                                              | 50-52                                                                                               | 54-56                                                                                                | 58-60                                                                                                |
| Артикул<br>Цвет                        | ADW041R_WTS<br> | ADW041R_WTM<br> | ADW041R_WTL<br> | ADW041R_WTXL<br> | ADW041R_WT2XL<br> | ADW041R_LB3XL<br> |
|                                        | белый                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |
|                                        | ADW041R_LBS<br> | ADW041R_LBM<br> | ADW041R_LBL<br> | ADW041R_LBXL<br> | ADW041R_LB2XL<br> | ADW041R_LB3XL<br> |
| голубой                                |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |
| Материалы                              | 100% хлопок                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |

2 Комплект поставки

- адаптивные трусы на кнопках, женские (размер и цвет изделия отмечены в п. 1.2) – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Произведено в России.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Адаптивные трусы на кнопках женские, КОС®

**1 Описание и работа изделия**

**1.1 Конструкция**

Классические женские трусы на резинке средней посадки, с застежками на кнопки по бокам.

**1.2 Подбор размера**

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

| Маркировка размера | Соответствие российскому размеру | Обхват талии, см | Обхват бедра, см |
|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| S                  | 40-42                            | 58-62            | 46               |
| M                  | 44-46                            | 66-70            | 50               |
| L                  | 46-48                            | 74-78            | 54               |
| XL                 | 50-52                            | 82-86            | 58               |
| 2XL                | 54-56                            | 90-94            | 62               |
| 3XL                | 58-60                            | 98-102           | 64               |



**2 Меры предосторожности**

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Запрещается применение изделия при загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

**3 Инструкция по использованию**

1. Расстегните кнопки по бокам.
2. Подведите изделие снизу, обогните им переднюю и заднюю часть тазовой области.
3. Застегните кнопки на боках.

Для лежачих пациентов с помощью ухаживающего:

1. Расстегните кнопки на трусах.
2. Поверните подопечного на левый бок.
3. Расположите раскрытые трусы на кровати изнаночной стороной вверх.
4. Верните подопечного в положение лежа (на предварительно разложенные трусы), немного разведите ноги подопечного в стороны.
5. Выньте переднюю часть трусов из-под подопечного, расправьте ее на нем и застегните кнопки на боках.
6. Расправьте трусы на подопечном, избегайте перекручивания изделия.

**4 Правила ухода за изделием**

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть кнопки. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



⚠ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: [tmkos.ru](http://tmkos.ru)  
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Адаптивные трусы на кнопках женские, КОС®

**1 Описание и работа изделия**

**1.1 Конструкция**

Классические женские трусы на резинке средней посадки, с застежками на кнопки по бокам.

**1.2 Подбор размера**

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

| Маркировка размера | Соответствие российскому размеру | Обхват талии, см | Обхват бедра, см |
|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| S                  | 40-42                            | 58-62            | 46               |
| M                  | 44-46                            | 66-70            | 50               |
| L                  | 46-48                            | 74-78            | 54               |
| XL                 | 50-52                            | 82-86            | 58               |
| 2XL                | 54-56                            | 90-94            | 62               |
| 3XL                | 58-60                            | 98-102           | 64               |



**2 Меры предосторожности**

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Запрещается применение изделия при загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

**3 Инструкция по использованию**

1. Расстегните кнопки по бокам.
2. Подведите изделие снизу, обогните им переднюю и заднюю часть тазовой области.
3. Застегните кнопки на боках.

Для лежачих пациентов с помощью ухаживающего:

1. Расстегните кнопки на трусах.
2. Поверните подопечного на левый бок.
3. Расположите раскрытые трусы на кровати изнаночной стороной вверх.
4. Верните подопечного в положение лежа (на предварительно разложенные трусы), немного разведите ноги подопечного в стороны.
5. Выньте переднюю часть трусов из-под подопечного, расправьте ее на нем и застегните кнопки на боках.
6. Расправьте трусы на подопечном, избегайте перекручивания изделия.

**4 Правила ухода за изделием**

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть кнопки. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



⚠ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: [tmkos.ru](http://tmkos.ru)  
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.