

ПАСПОРТ
АДАПТИВНЫЕ ТРУСЫ НА КНОПКАХ, МУЖСКИЕ, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Предмет мужского нижнего белья, облегчающий процесс переодевания и доступ к замене средств гигиены (подгузнику) пациентам с проблемами в области таза и нижних конечностей. Изделие облегчает ежедневный уход при ношении пациентом ортопедических конструкций, восстановлении после травм, при вынужденном положении (нейродегенеративные заболевания, инсульты, нижние параличи и парезы различного генеза), а также в пожилом и старческом возрастах.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	S	M	L	XL	2XL
Соответствие российскому размеру	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Артикул	ADW042R_WTS	ADW042R_WTM	ADW042R_WTL	ADW042R_WTXL	ADW042R_WT2XL
	Белый				
	ADW042R_OLS	ADW042R_OLM	ADW042R_OLL	ADW042R_OLXL	ADW042R_OL2XL
	Оливковый				
	ADW042R_DBS	ADW042R_DBM	ADW042R_DBL	ADW042R_DBXL	ADW042R_DB2XL
	Темно-синий				
Цвет	ADW042R_GRS	ADW042R_GRM	ADW042R_GRL	ADW042R_GRXL	ADW042R_GR2XL
	Зеленый				
Материалы	100% хлопок				

2 Комплект поставки

- адаптивные трусы на кнопках, мужские (размер и цвет изделия отмечены в п. 1.2) – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

ПАСПОРТ
АДАПТИВНЫЕ ТРУСЫ НА КНОПКАХ, МУЖСКИЕ, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Предмет мужского нижнего белья, облегчающий процесс переодевания и доступ к замене средств гигиены (подгузнику) пациентам с проблемами в области таза и нижних конечностей. Изделие облегчает ежедневный уход при ношении пациентом ортопедических конструкций, восстановлении после травм, при вынужденном положении (нейродегенеративные заболевания, инсульты, нижние параличи и парезы различного генеза), а также в пожилом и старческом возрастах.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	S	M	L	XL	2XL
Соответствие российскому размеру	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Артикул	ADW042R_WTS	ADW042R_WTM	ADW042R_WTL	ADW042R_WTXL	ADW042R_WT2XL
	Белый				
	ADW042R_OLS	ADW042R_OLM	ADW042R_OLL	ADW042R_OLXL	ADW042R_OL2XL
	Оливковый				
	ADW042R_DBS	ADW042R_DBM	ADW042R_DBL	ADW042R_DBXL	ADW042R_DB2XL
	Темно-синий				
Цвет	ADW042R_GRS	ADW042R_GRM	ADW042R_GRL	ADW042R_GRXL	ADW042R_GR2XL
	Зеленый				
Материалы	100% хлопок				

2 Комплект поставки

- адаптивные трусы на кнопках, мужские (размер и цвет изделия отмечены в п. 1.2) – 1 шт.,
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.2 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДАПТИВНЫЕ ТРУСЫ НА КНОПКАХ, МУЖСКИЕ, КОС®

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Классические мужские трусы-шорты на резинке средней посадки, с застежками на кнопках по бокам.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Обхват талии, см	Обхват бедра, см
S	42-44	64-70	46
M	46-48	76-82	50
L	50-52	88-94	54
XL	54-56	100-106	58
2XL	58-60	112-118	62



2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Запрещается применение изделия при загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

3 Инструкция по использованию

1. Расстегните кнопки по бокам.
2. Подведите изделие снизу, обогните им переднюю и заднюю часть тазовой области.
3. Застегните кнопки на боках.

Для лежачих пациентов с помощью ухаживающего:

1. Расстегните кнопки на трусах.
2. Поверните подопечного на левый бок.
3. Расположите раскрытые трусы на кровати изнаночной стороной вверх.
4. Верните подопечного в положение лежа (на предварительно разложенные трусы), немного разведите ноги подопечного в стороны.
5. Выньте переднюю часть трусов из-под подопечного, расправьте ее на нем и застегните кнопки на боках.
6. Расправьте трусы на подопечном, избегайте перекручивания изделия.

4 Правила ухода за изделием

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть кнопки. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



△ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДАПТИВНЫЕ ТРУСЫ НА КНОПКАХ, МУЖСКИЕ, КОС®

1 Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Классические мужские трусы-шорты на резинке средней посадки, с застежками на кнопках по бокам.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Обхват талии, см	Обхват бедра, см
S	42-44	64-70	46
M	46-48	76-82	50
L	50-52	88-94	54
XL	54-56	100-106	58
2XL	58-60	112-118	62



2 Меры предосторожности

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Запрещается применение изделия при загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

3 Инструкция по использованию

1. Расстегните кнопки по бокам.
2. Подведите изделие снизу, обогните им переднюю и заднюю часть тазовой области.
3. Застегните кнопки на боках.

Для лежачих пациентов с помощью ухаживающего:

1. Расстегните кнопки на трусах.
2. Поверните подопечного на левый бок.
3. Расположите раскрытые трусы на кровати изнаночной стороной вверх.
4. Верните подопечного в положение лежа (на предварительно разложенные трусы), немного разведите ноги подопечного в стороны.
5. Выньте переднюю часть трусов из-под подопечного, расправьте ее на нем и застегните кнопки на боках.
6. Расправьте трусы на подопечном, избегайте перекручивания изделия.

4 Правила ухода за изделием

Машинная деликатная или ручная стирка при температуре до 40 °С, отжим на минимальных оборотах. Перед стиркой застегнуть кнопки. Машинная сушка запрещена. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Химическая чистка запрещена.



△ Перед первым использованием рекомендуется постирать изделие. После стирки изделие может дать усадку.

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.