

ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»

199226 г. Санкт-Петербург, Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н. офис 102

> Тел.: 8 (495) 775-80-27 e-mail: medfix@mail.ru

сайт: tmkos.ru

ПАСПОРТ

Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской

- 1.Общие сведения об изделии:
- 1.1. Наименование: Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской
- 1.2. **Артикул:** ADW067R
- 1.3. Назначение: Мужской летний адаптивный костюм (кофта на молнии+брюки) предназначен для повседневного использования в качестве домашней одежды для людей перенесших травмы, хирургические операции, а также заболевания, приведшие к нарушению подвижности плечевого пояса и/ или верхних конечностей, нижних конечностей, а также нарушений в области таза в период восстановления здоровья и физических функций. Костюм также может использоваться людьми пожилого и старческого возраста с возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата
- 2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные пар	аметры изд	елия:						
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер								
Рост	164-170							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер								
		\sim	\sim				\sim	
Рост	170-176							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер								
Рост	176-182							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер								
Рост	182-188							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер								
Рост	188-194							
Материал	95% xб 5% лайкра							

- 2.2. Сведения об упаковке и маркировке:
- 2.2.1. Комплектация:
- Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Транспортная упаковка картонные коробки.
- 3. Условия транспортировки
- 3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
- 3.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.
- 4. Гарантийные обязательства
- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- 4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями:
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.	

Дата изготовления	Штамп ОТК
цата изготовления	штамп отк

Произведено в России



ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»

199226 г. Санкт-Петербург, Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н. офис 102 Тел.: 8 (495) 775-80-27

> e-mail: medfix@mail.ru сайт: tmkos.ru

ПАСПОРТ

Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской

- 1.Общие сведения об изделии:
- 1.1. Наименование: Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской
- 1.2. **Артикул:** ADW067R
- 1.3. Назначение: Мужской летний адаптивный костюм (кофта на молнии+брюки) предназначен для повседневного использования в качестве домашней одежды для людей перенесших травмы, хирургические операции, а также заболевания, приведшие к нарушению подвижности плечевого пояса и/ или верхних конечностей, нижних конечностей, а также нарушений в области таза в период восстановления здоровья и физических функций. Костюм также может использоваться людьми пожилого и старческого возраста с возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата
- 2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные па	іраметры изд	целия:						
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер				0		0		0
Рост	164-170							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер				0		\circ		\circ
Рост	170-176							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер			\circ	0	\circ	0		0
Рост	176-182							
_	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер				0		\circ		\circ
Рост	182-188							
	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
Размер				\circ				\circ
Рост	188-194							
Материал		95% хб 5% лайкра						

- 2.2. Сведения об упаковке и маркировке:
- 2.2.1. Комплектация:
- Адаптивный костюм кофта на молнии+брюки, летний, мужской 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Транспортная упаковка картонные коробки.
- 3. Условия транспортировки
- 3.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
- 3.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.
- 4. Гарантийные обязательства
- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- 4.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления	Штамп ОТК
Произведено в России	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адаптивный костюм худи+брюки, демисезонный, мужской

1. Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Конструкция кофты с капюшоном усовершенствована застежкой-молнией спереди и по боковым швам вдоль туловища с продолжением на внутреннюю сторону рукавов. Также используется застежка-молния по боковым швам на брюках.

2. Меры предосторожности


- 2.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- 2.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.
- 2.3. Использовать изделие с учетом обеспечения комфорта для пациента в зависимости от температуры окружающей среды, не допуская перегрева и переохлаждения
- 2.4. Запрещается применение изделия при:
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3. Инструкция по использованию

- 3.1. На кофте и на брюках необходимо расстегнуть застежки, в той мере, которая обеспечат комфортное одевание с учетом индивидуальных особенностей и состояния пациента. При необходимости для одевания пациента привлекается ухаживающий персонал.
- 3.2. Адаптировать имеющиеся ортопедические конструкции, дренажи и другие элементы индивидуального медицинского обеспечения.
- 3.3 После использования кофта и брюки снимаются с пациента с минимальными неудобствами для него. Просушиваются или подвергаются стирке, при необходимости.

4. Правила ухода за изделием

Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Предварительно застегнув все молнии. Машинная стирка при температуре д 40 °C на деликатном режиме. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества. Гладить при температуре 150 С Химическая чистка запрешена.

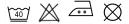

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

Здоровья Вам и Вашим близким!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адаптивный костюм худи+брюки, демисезонный, мужской

1. Описание и работа изделия

1.1 Конструкция

Конструкция кофты с капюшоном усовершенствована застежкой-молнией спереди и по боковым швам вдоль туловища с продолжением на внутреннюю сторону рукавов. Также используется застежка-молния по боковым швам на брюках.

2. Меры предосторожности

- 2.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- 2.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.
- 2.3. Использовать изделие с учетом обеспечения комфорта для пациента в зависимости от температуры окружающей среды, не допуская перегрева и переохлаждения
- 2.4. Запрещается применение изделия при:
- загрязнении биологическими или химическими веществами. несущими опасность здоровью человека:
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3. Инструкция по использованию

- 3.1. На кофте и на брюках необходимо расстегнуть застежки, в той мере, которая обеспечат комфортное одевание с учетом индивидуальных особенностей и состояния пациента. При необходимости для одевания пациента привлекается ухаживающий персонал.
- 3.2. Адаптировать имеющиеся ортопедические конструкции, дренажи и другие элементы индивидуального медицинского обеспечения.
- 3.3 После использования кофта и брюки снимаются с пациента с минимальными неудобствами для него.
 Просушиваются или подвергаются стирке, при необходимости.

4. Правила ухода за изделием

Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Предварительно застегнув все молнии. Машинная стирка при температуре до 40 °C на деликатном режиме. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества. Гладить при температуре 150 С. Химическая чистка запрещена.



Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.

Здоровья Вам и Вашим близким!